

Smiths Medical Publications

This publication has been compiled and approved by Smiths Medical for use with their respective products. It is supplied in this format to permit users to access the text and illustrations for their own use e.g. training and educational purposes.

Users of the equipment must ensure that they have read and understood the contents of the complete manual including the warnings and cautions and have been trained in the correct use of the product.

Smiths Medical cannot be held responsible for the accuracy and any resulting incident arising from information that has been extracted from this publication and compiled into the users documentation.

This publication maybe subject to revision and it is the users responsibility to ensure that the correct version of manual/text/illustration is used in conjunction with the equipment.

ACCEPT

REJECT

smiths

Smiths Medical MD, Inc.,

1265 Grey Fox Road, St. Paul, MN 55112, U.S.A.

European representative:

Smiths Medical International Limited

Watford, Herts, UK, WD24 4LG

www.smiths-medical.com

© 2005 Smiths Medical family of compaines. All rights reserved.

smiths


Smiths Medical - A part of Smiths Group plc

Toedienen van een handmatige bolus

Er zijn twee mogelijkheden om een bolus toe te dienen: uw pomp kan met alleen de handmatige bolus optie (zoals hieronder beschreven) geconfigureerd zijn, of ook de preset bolus keuze optie hebben (zoals hiernaast beschreven).

1. Markeer de hotspot **BOLUS** en druk op de knop.

2. De bolussnelheid wordt weergegeven. Markeer de snelheid en druk op de knop om de snelheid indien nodig te wijzigen.

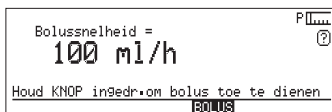

3. Als de bolussnelheid correct is, houdt u de knop ingedrukt om de bolus toe te dienen.

4. Laat de knop los om de bolus te beëindigen en naar het infusiescherm terug te keren.


Infusie- en alarm-LED's

● Groen knipperend
Pomp infundeert

● Continu groen brandend
Infusie is onderbroken

● Oranje knipperend/continu oranje brandend
Spuit is bijna leeg

● Rood knipperend (met alarm)
Pomp is gestopt; lees het bericht op het scherm

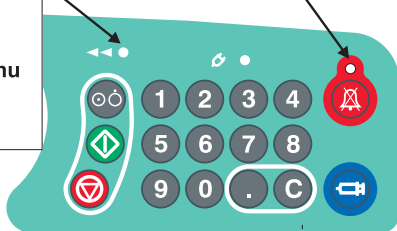

Toedienen van een preset bolus


Indien de preset bolus is geactiveerd in het configuratie menu, moet het toedienen van een preset bolus uitgevoerd worden zoals hieronder beschreven.

1. Markeer de hotspot **BOLUS** en druk op de knop om het menu Bolustoediening weer te geven.

2. Selecteer **Preset** uit het menu Bolustoediening.


3. Gebruik het toetsenbord om de toe te dienen bolusdosis in te voeren.

4. Nadat u de dosis heeft ingevoerd, wordt het tijdstip van de bolus weergegeven, op basis van de weergegeven bolussnelheid.

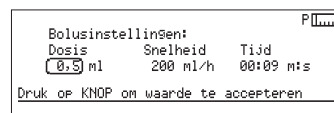


5. Druk op de knop om deze waarden te accepteren.

6. Houd de knop een seconde ingedrukt om de bolustoediening te starten.

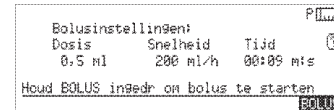

7. U kunt de knop op elk gewenst moment indrukken om de bolustoediening te stoppen.

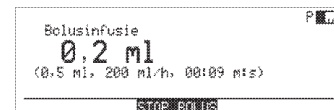

De toediening wordt automatisch beëindigd zodra de gevraagde dosis is toegediend.

Smiths Medical MD, Inc.
1265 Grey Fox Road, St. Paul, MN 55112, U.S.A.

Europese Vertegenwoordiger:
Smiths Medical International Limited
Watford, Hertfordshire, UK, WD24 4LG

www.smiths-medical.com

© 2009 Smiths Medical bedrijvenfamilie. Alle rechten voorbehouden.

Artikelnr. 0151-0881-103 03/09



Omnifuse is een handelsmerk van de Smiths Medical bedrijvenfamilie.

Het symbool * geeft aan dat het handelsmerk bij het Amerikaanse patenten- en handelsmerkenkantoor en in bepaalde andere landen gedeponeerd is.

smiths medical

Omnifuse – Verkorte gebruiksaanwijzing


Uitvoerige informatie, waarschuwingen en let op-meldingen kunt u vinden in de Instructiehandleiding.

Een spuit laden

1. Open de spuitklem en plaats de spuit in de uitsparing, met de vleugel in de gleuf.

2. Sluit de spuitklem.

3. Bevestig het merk en de maat van de spuit.

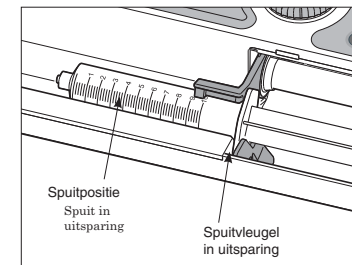

4. Houd de blauwe laad-toets ingedrukt terwijl op het scherm **SPIJT LADEN** verschijnt.

5. Laat de toets los wanneer op het scherm **SPIJT GEPLAATST** verschijnt.

Een spuit vervangen

Tijdens een continue infusie kunt u een lege spuit door een nieuw merk en/of een nieuwe maat van spuit vervangen.

1. Onderbreek de infusie door op de rode Stop-toets te drukken.

2. Til de spuitklem op en volg de instructies die op het scherm verschijnen om de spuit te verwijderen.

3. Plaats een nieuwe spuit in de uitsparing; zorg ervoor dat de vleugel in de spuitvleugeluitsparing past. Sluit de spuitklem.

4. Volg de instructies die op het scherm verschijnen om het spuitmerk te bevestigen en de spuit te laden.

5. Druk op de groene Start-toets om te herstarten.

Een continue infusie programmeren

Volg de onderstaande stappen om de Omifuse voor een continue infusie te programmeren door de snelheid in ml/h in te voeren.

1. Zet de pomp aan en wacht tot de zelftest is uitgevoerd.




2. Volg de aanwijzingen op het scherm om de spuit in de pomp te laden.



3. Als er meer dan één infusiemodus beschikbaar is, drukt u op de knop om **CONTINU** als modus te bevestigen.

4. Gebruik de knop of het toetsenbord om de infusiesnelheid te wijzigen en druk daarna op de knop om de weergegeven snelheid te accepteren.

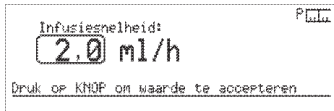

5. Om de totalisator te resetten, markeert u **TOTAAL** en drukt u op de knop. Markeer **RESET** en druk nogmaals op de knop.




De pomp is nu klaar om een infusie te starten. Zorg ervoor dat u alle lucht uit de lijn heeft gepurgeerd VOORDAT u deze bij de patiënt aansluit.

De infusie starten

Start de infusie nadat alle parameters zijn gecontroleerd.

Druk op de groene Start-toets:

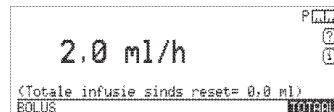


Controleer/wijzig de occlusiedruk alarmgrens

U kunt de occlusiealarminstelling wijzigen voor u de infusie start of als u de infusie onderbreekt.

1. Het pictogram Occlusieniveau – in de rechterhoek bovenaan op het scherm - geeft de huidige instelling weer.

2. Draai aan de knop om het pictogram te markeren en druk op de knop om een menu met de beschikbare niveaus (max. 5) weer te geven.

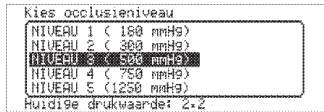

3. Draai aan de knop om het juiste niveau voor de infusie te markeren.

4. Druk op de knop om het niveau te bevestigen en naar het infusiescherm terug te keren.

De lijn purgeren

Als u de lijn niet handmatig gepurgeerd hebt, moet u deze procedure uitvoeren voordat u de groene start-toets indrukt.

1. Markeer en selecteer de hotspot **PURGEREN**.

2. Zorg ervoor dat de lijn van de patiënt is losgekoppeld.



3. Houd de knop ingedrukt om te purgeren.

4. Als het purgeren voltooid is, laat u de knop los. Nu kunt u de infusie starten.


Infusiesnelheid wijzigen tijdens infusie

Indien geconfigureerd op uw pomp kunt u de infusiesnelheid wijzigen tijdens infusie.

1. Draai aan de knop om de huidige infusiesnelheid te selecteren en druk op de knop.



2. Voer de nieuwe infusiesnelheid in en druk op de knop om de nieuwe snelheid te accepteren.

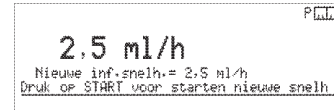

3. Om de pomp met de nieuwe snelheid te laten werken, drukt u op de groene Start-toets:

Indien u de verandering niet bevestigd door middel van een druk op groene Start-toets, zal de snelheidswijziging niet werd uitgevoerd.

Onderbreken en beëindigen van een infusie

Een infusie kan onderbroken (gepauzeerd) worden en daarna weer hervat worden, of u kunt de infusie beëindigen.

■ Om de infusie te onderbreken, drukt u kort op de rode Stop-toets:

■ Om de infusie te herstarten, drukt u op de groene Start-toets:

■ Om de infusie volledig te beëindigen, houdt u de rode Stop-toets ingedrukt: Houd deze toets twee seconden ingedrukt tot u een geluidssignaal hoort.

■ Als de infusie beëindigd is, kunt u de pomp voor een andere patiënt of infusie programmeren of kunt u de pomp uitschakelen. Om de pomp uit te schakelen, houdt u de grijze aan/uit-toets ingedrukt: Houd deze toets twee seconden ingedrukt.