



Rinoflow vernevelaar gebruikergegevens

Indien van toepassing, handig om in te vullen.

Toestelnummer: _____

Aanschafdatum: _____

Naam: _____

Adres: _____

Plaats: _____

Verzekering: _____

Polisnummer: _____

Inhoudsopgave

Algemeen	3
Gebruiksklaar maken van de Rinoflow	4
Vernevelen met de Rinoflow in positie 1	5
Vernevelen met de Rinoflow in positie 2	6
Schoonmaken van de Rinoflow	7
Zelf storingen verhelpen	8
Technische gegevens	8
Onderhoud	9

Algemeen


Het Rinoflow vernevelingsstelsel is samengesteld uit:

- 1 compressor
- 2 vernevel / spoelkamer
- 3 luchtslang

De Rinoflow vernevel- of spoelkamer (2) bestaat uit de volgende onderdelen:

- A grote spoelkamer
- B kleine spoelkamer met blauwe afdichtring
- C verstuiver (blauw)
- D spoelkamerhouder (wit)

Nb. Om medische veiligheidsredenen mag de Rinoflow spoelkamer alleen gebruikt worden met de meegeleverde Rinoflow compressor!

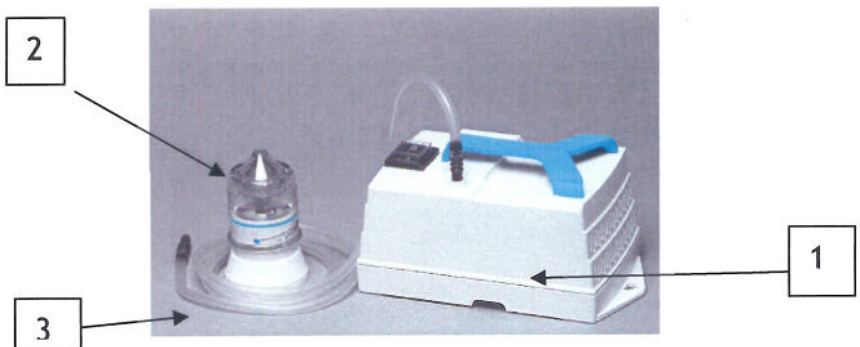

Gebruiksklaar maken van de Rinoflow

1. Draai de grote (buitenste) spoelkamer (A) in positie 2.
2. Spuit de te vernevelen vloeistof (max. 8cc) bovenin het reservoir van de spoelkamer, bijvoorbeeld d.m.v. een injectiespuit
3. Draai de grote (buitenste) spoelkamer (A) terug naar positie 1.
4. Monteer de luchtslang aan de onderzijde van de witte spoelkamerhouder.
5. Sluit het andere eind van de slang aan op de bovenzijde van de Rinoflow compressor.
6. Steek de stekker van de compressor hierna in het stopcontact 220-240V > 50-60 Hertz.

De Rinoflow is nu gebruiksklaar.

Vernevelen met de Rinoflow in positie 1

1. Controleer of de grote (buitenste) spoelkamer (A) ingesteld is in positie 1.
2. Vul het reservoir met de te vernevelen vloeistof en sluit de Rinoflow aan volgens de instructies nr. 4 t/m 6 van het hoofdstuk 'gebruiksklaar maken van de Rinoflow'.
3. Plaats de bovenzijde van de vernevelkamer in een neusgat
4. Zet het toestel aan d.m.v. de schakelaar aan de bovenzijde van de Rinoflow compressor.
5. Adem gedurende de behandeling normaal door de neus. Het loskomende nasale slijm kan tijdens het gebruik van de Rinoflow tegen de nevelstroom in worden uitgesnoten. Het materiaal zal zich automatisch verzamelen in de grote spoelkamer.
6. Zet het toestel uit en herhaal, indien nodig, de procedure in het andere neusgat.

Nb. Maximale duur van de behandeling: 1 minuut per neusgat.

Vernevelen met de Rinoflow in positie 2

Attentie!

Zorg, alvorens u positie 2 gebruikt, dat eerst een behandeling met fysiologisch zout (verkrijgbaar bij apotheek) volgens positie 1 is uitgevoerd!

1. Controleer of de grote (buitenste) spoelkamer (A) ingesteld is in positie 2.
2. Vul het reservoir met de te vernevelen vloeistof en sluit de Rinoflow aan volgens de instructies nr. 4 t/m 6 van het hoofdstuk 'gebruiksklaar maken van de Rinoflow'.
3. Plaats de Rinoflow vernevelkamer in een neusgat.
4. Zet het toestel aan d.m.v. de schakelaar aan de bovenzijde van de compressor.
5. Druk, tijdens de behandeling het andere neusgat dicht (tenzij anders door uw arts is voorgeschreven). Houdt met tussenposen uw mond gesloten en uw adem in. Vrijgekomen slijm kan gewoon worden uitgespuwd.

Nb. Maximale duur van de behandeling: 1½ minuut per neusgat.

Attentie!

Personen die afwijkingen vertonen aan, of een ingreep hebben ondergaan aan de trommelvlies, mogen de Rinoflow NIET gebruiken!

Schoonmaken van de Rinoflow

Aan het einde van iedere behandeling is het verstandig de kamer met opgevangen materiaal te ledigen.

1. Verwijder de stekker uit het stopcontact.
2. Koppel de luchtslang af van de compressor.
3. Verwijder de grote spoelkamer (A) als volgt:
 - Draai de witte spoelkamerhouder zodanig dat de blauwe punten zich midden tussen pos. 1 en pos. 2 bevinden.
 - Verwijder de spoelkamer daarna (met enige kracht) van de spoelkamerhouder.
4. Verwijder daarna de kleine spoelkamer (B).
5. Verwijder daarna de (blauwe) verstuiver.
6. Vervolgens alle onderdelen eventueel in een mild sopje reinigen. Daarna doorspoelen met stromend leidingwater. Alles goed drogen en opnieuw monteren.

Attentie!

Naast bovengenoemde schoonmaakprocedure adviseren wij u de complete vernevelkamer te desinfecteren volgens de los bijgeleverde schoonmaak procedure.

Zelf storingen verhelpen

De Rinoflow is een kwalitatief hoogwaardig product dat tijdens de fabricage gecontroleerd is op langdurig intensief gebruik.

Toch kan het gebeuren dat er, ondanks zorgvuldig gebruik, kleine storingen optreden. Meestal kunnen deze storingen door de gebruiker zelf verholpen worden. Controleer met behulp van onderstaande checklist of u niets over het hoofd heeft gezien.

- Staat er netspanning op de contactdoos?
- Zit de stekker in het stopcontact?
- Staat de schakelaar van de Rinoflow op 1?
- Is de luchtslang goed aangesloten op de compressor en de vernevelkamer?
- Zit er vloeistof in het vernevelreservoir?
- Ontbreken er geen onderdelen op of in de vernevelkamer?

Functioneert de Rinoflow niet, na bovengenoemde punten te hebben gecontroleerd, neem dan contact op met uw leverancier.

Technische gegevens


Elektrische aansluiting:	wisselstroom 220-240V/50 Hz
Opgenomen vermogen:	96VA
Ampere:	0.40
IEC:	529 protection ref. = IP30
Nevelopbrengst:	pos.1 = 2,8 ml/min. pos.2 = 3,6 ml/min.
Afmeting Compressor:	20x12,5x11 cm (lxbxh)
Gewicht:	1635gram
Klasse:	II Type B IEC 601.1

Onderhoud

Het filter vervangen


Zorg voordat u het filter vervangt dat de stekker niet in het stopcontact zit. Het filter moet minstens eenmaal per jaar worden vervangen als het apparaat vaak (minstens éénmaal per dag) wordt gebruikt.

Verwijder het filterdeksel om het filter te vervangen. Het filterdeksel bevindt aan de onderzijde van de Rinoflow. Verwijder het gebruikte filter en vervang het door een nieuw filter. Plaats het deksel terug.

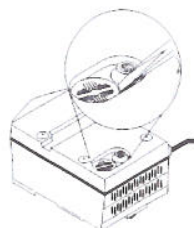

De zekering vervangen

Zorg voordat u de zekering vervangt dat de stekker niet het stopcontact zit. Gebruik een kleine schroevendraaier om de zekeringhouder te verwijderen. Verwijder de zekering en vervang deze door een nieuwe zekering die voor uw apparaat geschikt is. Plaats de zekeringhouder terug in het vak.

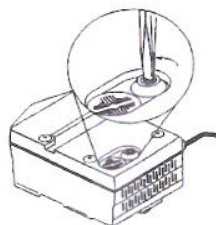

Onderhoud afdichtringen van vernevel/spoelkamer

Farmadomo adviseert om bij regelmatig gebruik de beide afdichtringen van de vernevelkamer dun met zuurvrije vaseline in te smeren. Dit is verkrijgbaar bij de drogist.

Bij regelmatig insmeren ontstaat minder kans op slijtage van en scheurtjes in deze gevoelige onderdelen. Het insmeren kunt u het beste doen als u de onderdelen na de desinfectie procedure in elkaar gaat zetten.

Levensduur van de vernevel/spoelkamer met slang

De levensduur van de vernevel/spoelkamer is 1 à 1½ jaar, afhankelijk van de gebruikswijze en gebruiksfrequentie.

